

# EASY

Mini implants



MADE IN ITALY






## EASY MINI IMPLANTS


- Mini impianto in Titanio grado 5 (Ti 6Al-4V ELI) con design a vite filettata automaschiante di diametro contenuto (2 o 2,3 mm) e attacco a sfera con diametro 1,8mm.
- Protocollo chirurgico semplice e minimamente invasivo
- Indicato per la stabilizzazione di protesi totali, la sostituzione di incisivi laterali e come supporto in tecniche implantari miste.




**1** Dopo aver marcato la posizione del foro d'ingresso del mini impianto, direttamente sulla gengiva, con una penna dermografica, utilizzare la fresa di posizionamento FPM001, con abbondante irrigazione. Effettuando movimenti delicati up and down, forare l'osso nella direzione stabilita, raggiungendo la profondità corretta per il mini impianto da inserire.

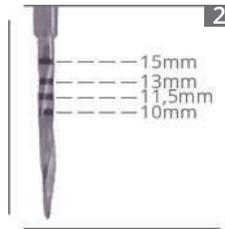

**2** Il foro di entrata deve essere profondo esattamente quanto la lunghezza dell'impianto che si andrà a posizionare. Per facilitare questa operazione, fresa sono presenti delle tacche corrispondenti alle quattro lunghezze disponibili per i mini impianti.

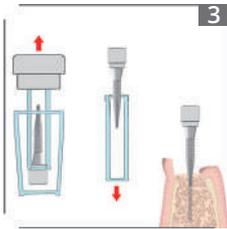


**3** Una volta rimossi i sigilli di garanzia, estrarre il tappo dal flacone esterno. Estrarre il flacone interno, avendo cura di non toccare l'impianto. Utilizzare il tappo per posizionare il mini impianto nel foro di preparazione e avvitare per un paio di giri in modo da poter sganciare il tappo. **ATTENZIONE** Il tappo esterno contiene la ghiera in titanio.

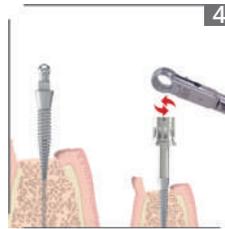

**4** Dopo aver rimosso il tappo, si procede con l'avvitamento del impianto utilizzando i due driver disposizione: il DA003 può essere utilizzato sia manualmente che con chiave dinamometrica, mentre il DC003 specifico per l'utilizzo con il contrangolo. L'impianto va avvitato finché tutte le sono all'interno dell'osso.

INFERIORE      SUPERIORE

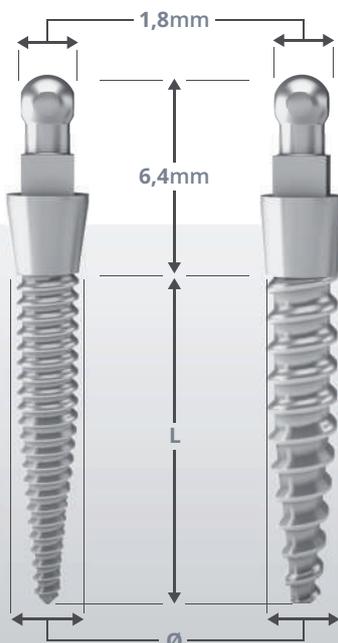

	L	COD
Ø 2,00	10 mm	LOW10
	11,5 mm	LOW11
	13 mm	LOW13
	15 mm	LOW15

	L	COD
Ø 2,30	10 mm	UP10
	11,5 mm	UP11
	13 mm	UP13
	15 mm	UP15

# ACCESSORI E KIT CHIRURGICO

## GHIERA



COD MH18

## CAPPETTA IN TEFLON



RITENZIONE STANDARD  
COD JM011

## GHIERA CON CAPPETTA

COD MHT18



RITENZIONE HARD  
COD JM012

COD MHT4

## MONCONE DRITTO




COD MDM001

## TRANSFER CALCINABILE



COD TIM001

## ANALOGO

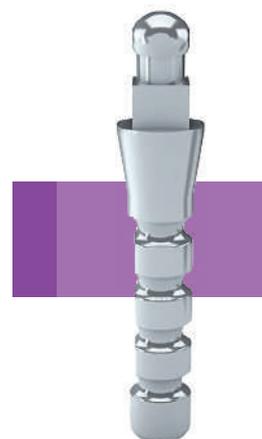

COD LOM001

## KIT CHIRURGICO -YCH403



- Fresa di preparazione Ø 1,5mm FPM001
- Driver per chiave DA003
- Driver per contrangolo DC003
- Chiave dinamometrica KD004

**NEW**

COMING SOON  
EASY ONE-PIECE



DISTRIBUITO DA:

[www.macodentalcare.com](http://www.macodentalcare.com)  
[info@macodentalcare.com](mailto:info@macodentalcare.com)



**CE 0425**